

Nosocomia

Prédésinfectant Instruments

Détergent désinfectant



CE
0459

Détergent désinfectant utilisé pour la prédésinfection de dispositifs médicaux non invasifs et invasifs tels que les instruments chirurgicaux réutilisables (ciseaux, pinces, écarteurs, curettes, spéculums...).

Marchés cibles : milieu médical et paramédical.


- ✓ **Formule sans aldéhyde, sans EDTA**
- ✓ **Bon pouvoir détersif**

Composition

Préparation à base de tensioactifs non ioniques et d'agents antimicrobiens.

Caractéristiques

- Aspect : liquide limpide incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité : 1,039
- Viscosité : inférieure à 50 mPa.s
- pH : alcalin

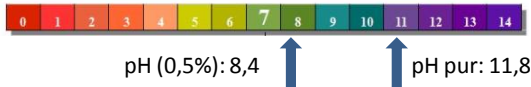

Compatibilité

▪ Non corrosif selon NF S 94-402-1 sur ciseaux et pinces Pelling weck (acier inoxydable), sur fraises diamantées DIA-TESSIN ni sur les fraises carbures DIA-TESSIN. Compatible avec acier inoxydable, PTFE, verre...

Mode d'emploi



En trempage : dans bac simple ou bain à ultrasons, immerger complètement les instruments dans une solution à **0,5%** dans de l'eau à 20°C.



Laisser agir
15 min.



Brosser si
nécessaire.



Rincer à l'eau
courante.

*Les conditions d'utilisation doivent être confirmées par l'hygiéniste ou l'utilisateur formé.
Le matériel d'application doit être rincé à l'eau après utilisation.*



Nosocomia Prédésinfectant

Instruments

Détergent désinfectant

Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact	Dose active
Bactéries	EN 13727*	15 min	0,5%
	EN 13727* <i>sur SARM et Enterococcus faecium vancomycine résistant</i>	15 min	0,08%
	EN 1276* (EBSE)	5 min	0,25%
Levures	EN 13624* <i>Candida albicans</i>	15 min	0,5%
Virus	Rotavirus SA 11, Herpès, HIV, BVDV, PRV	15 min	0,5%

*Normes réalisées en conditions de saleté

Propriétés toxicologiques

- Pur, irritant pour la peau et les yeux.
- Toxicité orale aigüe: non dangereux, DL 50>2000 mg/kg.

Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Conditionnement

Conditionnements	Code Produit
Bidon 5 L x 2	D0598BAW008
Doseur 1 L x 6	D0598FAP006
Doses 25 mL x 200	D0598ZBK00A
Pompe 10 mL pour bidon 5 L	LH458
Pompe 20 mL pour bidon 5 L	LH481

Rev.: 2/21.09.2015

