



# Nosocomia Surf + PAE

Spray détergent désinfectant



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

AFNOR Cert. 66633

CE  
0459

**Spray détergent désinfectant** pour surfaces, mobiliers, matériels et dispositifs médicaux non invasifs (lits médicaux, fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentistes...).

### Marchés cibles :

- Milieu médical et paramédical: dispositifs médicaux non invasifs
- Milieu médical, paramédical, collectivités, restauration, etc.: surfaces, mobiliers et matériel.

- ✓ **Compatible toutes surfaces**
- ✓ **Sans EDTA, sans alcool, sans CMR, sans aldéhyde**
- ✓ **Prêt à l'emploi**
- ✓ **Ne laisse pas de trace**
- ✓ **Conforme arrêté 08/09/1999 et textes ultérieurs**

### Composition

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium CAS n° 7173-51 -5 (4 g/kg), et tensioactifs non ioniques.

### Caractéristiques

- Aspect : liquide limpide incolore
- Odeur : inodore
- Densité : 0.978 – 1.018
- point d'éclair : >100°C



### Conservation

- Péréemption produit pur : 3 ans.
- Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé. Eviter les températures supérieures à 40°C.
- Craint le gel.

### Législation

- Double statut: produit biocide TP2, TP4 et solution désinfectante à marquage CE de classe IIa pour dispositifs médicaux non invasifs.
- Usage exclusivement professionnel.
- Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs sur les produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

### Compatibilité

- Compatible sur acier inoxydable, aluminium, plexiglas, PVC...

### Mode d'emploi



**Prêt à l'emploi.** Appliquer sur la surface à traiter ou sur un non tissé à raison d'environ +/- 6 mL/m<sup>2</sup> soit 10 pulvérisations.



Essuyer si nécessaire.



Ne pas rincer.

Rincer à l'eau potable les surfaces susceptibles d'être en contact avec des **denrées alimentaires**, et dans ce cas laisser agir avant rinçage selon l'activité microbiologique recherchée.

Le matériel d'application doit être rincé à l'eau après utilisation. Les conditions d'utilisations doivent être confirmées par l'hygiéniste ou l'utilisateur formé en fonction des conditions pratiques d'utilisation pour les dispositifs médicaux non invasifs.

Laboratoires Prodene Klint a GOJO family company

8 Rue Léon Jouhaux – Z.A Pariest – F-77435 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 – Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00 – Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

Email: [info@prodene-klint.com](mailto:info@prodene-klint.com) – <http://www.prodene-klint.com>



# Nosocomia Surf + PAE

Spray détergent désinfectant

## Propriétés microbiologiques


Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040	1 min
	EN 1276*	1 min
	EN 13697*	1 min
	EN 13697* sur SARM**, <i>Salmonella enterica</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Escherichia coli</i> $\beta$ lactamase (EBSE), <i>Acinetobacter</i> <i>baumanii</i>	1 min
	EN 13727+A2*	1 min
	EN 14561*	3 min
Levures	EN 1275	5 min
	EN 1650+A1*	5 min
	EN 13697*	5 min
	EN 13624	5 min
	EN 14562*	5 min
Virus	EN 14476* :	
	Herpès simplex, PRV (modèle hépatite B) Rotavirus SA11, BVDV(modèle hépatite C)	1 min 1 min

\*Normes réalisées en conditions de saleté. \*\*Staphylocoque résistant à la méthiciline

## Environnement

- Ne présente pas de danger pour l'environnement.
- Profil de biodégradabilité :

100%

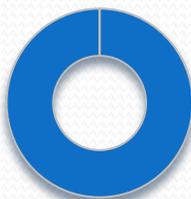

- Matières facilement biodégradables (OCDE301) et non concernées par la biodégradabilité (matières inorganiques)

## Propriétés toxicologiques

Ne présente pas de danger pour la santé.  
Pulvérisation mousse réduisant le risque d'inhalation du produit.

## Conditionnement

Conditionnements	Code Produit
Spray 750 mL x 6	D0714FAK001

## Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Rev.: 12/27.01.2017

Laboratoires Prodene Klint a GOJO family company

8 Rue Léon Jouhaux – Z.A Pariest – F-77435 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 – Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00 – Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

Email: [info@prodene-klint.com](mailto:info@prodene-klint.com) – <http://www.prodene-klint.com>

