


**TECH TO
PROTECT
YOU**

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



BARRAL

MASQUE IMPRIMÉ LAVABLE & RECYCLABLE

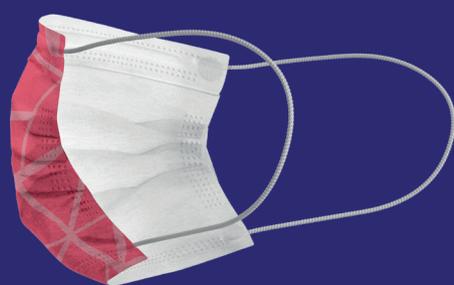

**SOYEZ ÉCORESPONSABLES,
PENSEZ LAVABLE & RECYCLABLE !**

UNE CONCEPTION ÉCORESPONSABLE ET UNE PROTECTION CERTIFIÉE

Chez Barral, nous nous attachons à produire un masque qui soit respectueux de l'environnement tout en vous garantissant une protection optimale. Cela passe par la mise en place de circuits courts grâce à un relais de partenaires vertueux ainsi qu'une collecte des masques usagés sur leur lieu d'utilisation. De plus, le masque Barral bénéficie de rapports de tests certifiant ses performances même après de multiples lavages. Tous ses composants sont certifiés «Standard 100 by Oeko-tex».

UN MASQUE LAVABLE TRÈS LÉGER

4 grammes, c'est le poids d'un masque Barral. Au-delà de sa légèreté, il est constitué de matériaux innovants vous garantissant un confort inégalé même après lavage. Son design à plis s'adapte parfaitement à votre visage et vous offrira une utilisation prolongée.

UNE PRODUCTION LOCALE

Notre masque est produit en Alsace. Nous privilégions la sous-traitance et les partenariats locaux : porter un masque Barral, c'est soutenir la production nationale.

FICHE PRATIQUE

COMPOSITION : Média filtrant : Textile Evolon® EVO 40 double-couche labellisé OekoTex 100®. Etoffe en micro-filaments spunbond hydrosplité composée de 60% PET et 40% PA.
Attaches : polyester

NIVEAU DE PERFORMANCE : Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de l'IFTH après 30 lavages (rapport 2020-04-07-026-50 du 19/06/2020)

- efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m} > 99\%$
- perméabilité à l'air pour une dépression de $100 \text{ Pa} > 117 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$

USAGES : Ce masque est adapté pour une utilisation dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Il peut également être utilisé dans le cadre d'autres affections transmissibles ou individuelles telles que la grippe ou les allergies respiratoires.

CONDITIONNEMENT :

- Blisters de 1 à 10 masques
- Boîte de 50 masques



ENTRETIEN :

Lavage à 30° en cycle court ou à la main, avec un produit lessiviel classique.

Séchage à l'air libre.

Repassage à température modérée (position délicat).

L'adoucissant n'est pas nécessaire. Il est recommandé de le placer dans un filet de protection pour un lavage en machine.



CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR LES PERSONNELS SOIGNANTS AU CONTACT DES PATIENTS.

La durée de port, elle, sera inférieure et limitée à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée). Le masque permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. Seule la protection limitée est revendiquée. Le masque barrière est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la population française.

MISE EN PLACE : Pour être efficaces, les masques grand public doivent être correctement utilisés. Pour cela, il est recommandé de :

- 1 Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique avant de mettre un masque
- 2 Pour une réutilisation de masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable
- 3 Repérer le haut du masque et placer le masque sur le visage
- 4 Tenir le masque et passer les élastiques du jeu de brides derrière les oreilles, et abaisser le bas du masque grand public en vérifiant qu'il couvre bien le menton
Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
- 5 Chaque fois que le masque est touché, le porteur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

RETRAIT : Pour ne pas être contaminé lors du retrait d'un masque grand public, il est recommandé de :

- Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque.
- Placer le masque dans un contenant spécifique (sac plastique) propre dans le cas où celui-ci est stocké afin d'être lavé ultérieurement.
- Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique. Nettoyer l'extérieur du sac avec un produit nettoyant.



5 Avenue de la Gare
68250 Rouffach

barral-technologies.com
contact@barral-technologies.com

n° SIRET: 88336661900012
n° TVA: FR 20883366619 | code APE: 3299Z

