




**TECH TO
PROTECT
YOU**

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



BARRAL

**MASQUE GRAND PUBLIC
FILTRATION SUPÉRIEURE À 90%
LAVABLE & RECYCLABLE**

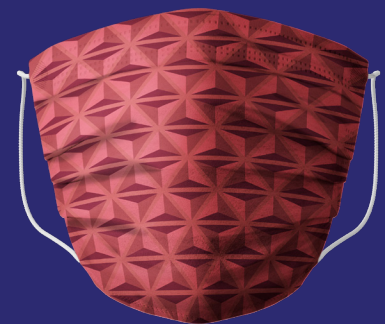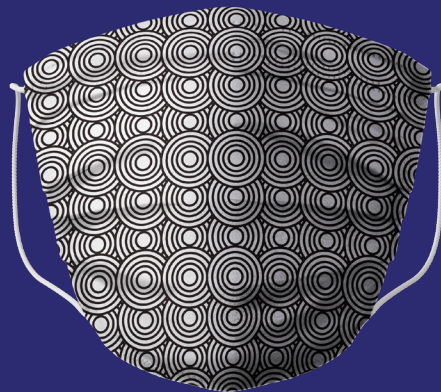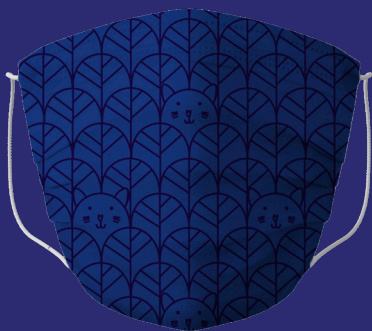

**SOYEZ ÉCORESPONSABLES,
PENSEZ LAVABLE & RECYCLABLE !**

UNE CONCEPTION ÉCORESPONSABLE ET UNE PROTECTION CERTIFIÉE

Chez Barral, nous nous attachons à produire un masque qui soit respectueux de l'environnement tout en vous garantissant une protection optimale. Cela passe par la mise en place de circuits courts grâce à un relais de partenaires vertueux ainsi qu'une collecte des masques usagés sur leur lieu d'utilisation. De plus, le masque Barral bénéficie de rapports de tests certifiant ses performances même après de multiples lavages. Tous ses composants sont certifiés «Standard 100 by Oeko-tex».

UN MASQUE LAVABLE TRÈS LÉGER

4 grammes, c'est le poids d'un masque Barral. Au-delà de sa légèreté, il est constitué de matériaux innovants vous garantissant un confort inégalé même après lavage. Son design à plis s'adapte parfaitement à votre visage et vous offrira une utilisation prolongée.

UNE PRODUCTION LOCALE

Notre masque est produit en Alsace. Nous privilégions la sous-traitance et les partenariats locaux : porter un masque Barral, c'est soutenir la production nationale.

FICHE PRATIQUE

COMPOSITION : Media filtrant : Textile Evolon® EVO 40 double-couche labellisé OEKO-TEX®. Etoffe en micro-filaments spunbond hydrosplitté composée de 60 % PET et 40 % PA. **Attaches :** Polyester sans latex. **Barrette nasale :** Acier enrobé de polypropylène.

NIVEAU DE PERFORMANCE : Matériau dont les performances ont été mesurées à 30 lavages.

Ce masque a démontré son efficacité de filtration de 92,1% à neuf et 99% après 30 lavages pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.

La respirabilité du masque a été mesurée à 175,6 L.m-2s-1 à neuf et 133,7 L.m-2s-1 après 30 lavages et doit permettre son port pour une durée de 4 heures.

USAGES : Ce masque est adapté pour une utilisation dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Il peut également être utilisé dans le cadre d'autres affections transmissibles ou individuelles telles que la grippe ou les allergies respiratoires.

CONDITIONNEMENT :
• Blisters de 5 ou 10 masques



ENTRETIEN :

Lavage à 40°C en cycle de court de 30 min minimum avec un produit lessiviel classique.

Utilisation d'un filet de lavage recommandée et possibilité de laver les masques avec le linge de maison.

Lavage à la main envisageable en utilisant un détergent tel que du savon, un produit lessiviel. Laisser tremper au moins 30 min.

Séchage après lavage à l'air libre.

Repassage à une température modérée (position délicat).



CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR LES PERSONNELS SOIGNANTS AU CONTACT DES PATIENTS. La durée de port, elle, sera inférieure et limitée à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée). Le masque permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. Seule la protection limitée est revendiquée. Le masque barrière est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la population française.

MISE EN PLACE : Pour être efficaces, les masques grand public doivent être correctement utilisés. Pour cela, il est recommandé de :

- 1 Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique
- 2 Pour une réutilisation du masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable
- 3 Repérer le haut du masque et placer le masque sur le visage
- 4 Tenir le masque, passer les élastiques du jeu de brides derrière les oreilles, et abaisser le bas du masque grand public en vérifiant qu'il couvre bien

5 Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque est touché, le porteur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

RETRAIT : Pour ne pas être contaminé lors du retrait d'un masque grand public, il est recommandé de :

- Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque.
- Placer le masque dans un contenant spécifique (sac plastique) propre dans le cas où celui-ci est stocké afin d'être lavé ultérieurement.
- Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer

